


## FÖRPACKNINGSPROCEDURER FÖR BLODPROV – UNDERSÖKNINGAR AV BLODGRUPP OCH BLODGRUPPSANTIKROPPAR UNDER GRAVIDITETEN

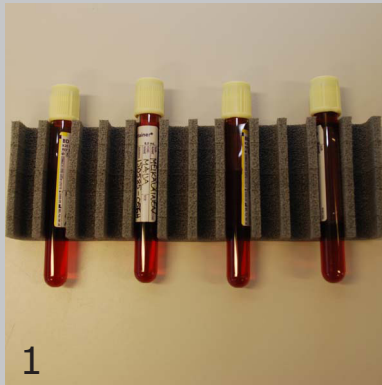

1. Placera provrören på skumplastunderlaget så, att underlaget hålls slätt och känns stadigt. Om det är få rör, lönar det sig att lämna tomrum mellan dem. Sätt högst åtta prov i en försändelse.
2. Sätt skumplastunderlaget i plastpåsen och placera den absorberande duken under skumplastunderlaget. Den absorberande duken hindrar vätskan att rinna ut ur påsen, ifall ett provrör går sönder. Vira inte den absorberande duken runt provrören.
3. Stäng påsen omsorgsfullt och vik den runt skumplastunderlaget.
4. Packa plastpåsen med sitt innehåll i den gul-svartrandiga lådan. Sätt också med remissen *Blodgruppsantikroppar under graviditeten* i lådan. Packa inte remissen in i plastpåsen.
5. Tryck in de två flikarna i lådans botten, för att lådan ska bli stadig och klara transporten bra. Stäng lådan med dess eget tejpband.
6. Se till att förpackningens mottagare är *SPR Veripalvelu, Näytteiden esikäsittely-yksikkö, Neuvolanäytetutkimukset*. Proven bör vara hos Blodtjänst senast inom 3-5 dygn från provtagningsdagen. Då prov skickas per post, bör Postens i kraft varande bestämmelser beaktas. Avsändaren betalar portot. Proven får inte lagas i postlådan, utan de skall levereras till Postens kontor. Förvara prov tagna på fredagen i stående ställning i kylskåp och posta genast på måndagen.
7. På vintertid skall man uppmärksamma, att provet inte får tillfrysas.

### Tilläggsinformation

Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Undersökningar för rådgivningsprov  
Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors  
tel. 050 374 2736 , fax 09 454 6212  
Veripalvelu® är ett registrerat varumärke.

Postens instruktioner för provförsändelser: [www.posti.fi](http://www.posti.fi)